



Biosen C-Line

Laborgenaue Glukose- und Laktatmessung in einem Test

- ◆ Einfach zu bedienen
- ◆ Ergebnisse innerhalb von 20–45 Sekunden
- ◆ Bis zu 120 Ergebnisse pro Stunde
- ◆ Niedrige Betriebskosten

C-LINE

GP+

• bis zu 5 Proben

CLINIC

• bis zu 20 Proben

Einfache Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • mehrsprachiges Touchscreen-Display mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen • nur 20 µl einer Blut, Plasma- oder Serumprobe werden bei Benutzung von vorgefüllten EKF 'Safe-Lock' Reaktionsgefäßen (1000 µl) benötigt • Ergebnisse innerhalb von 20 – 45 Sekunden. Bis zu 120 Ergebnisse pro Stunde • automatische Erkennung von Reaktionsgefäßen • Chip Sensoren einfach austauschbar, kein Reinigen der Elektroden erforderlich
Präzise und verlässlich	<ul style="list-style-type: none"> • enzymatisch-amperometrisches Messprinzip mit Chip-Sensoren • Messbereich: Glukose 0,5 – 50 mmol/L; Laktat 0,5 – 40 mmol/L • Unpräzision: VK $\leq 1,5\%$ (12 mmol/L) • vorgefüllte 'Safe-Lock' Reaktionsgefäße machen eine manuelle Verdünnung überflüssig • innovatives Nadel- und Tauscher-Design verhindert Kreuzkontamination • 3 Kalibrierungs-Modi
Maximale Effizienz und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Zweikanaloption: Glukose und/oder Laktatergebnisse aus einer Probe • lange Lebensdauer des Sensors: Glukose 60 Tage/7.500 Tests; Laktat 50 Tage/6.000 Tests • Proben bleiben bis zu 5 Tage lang stabil (Lagerung im Kühlschrank empfohlen) • STAT position
Effizientes Datenmanagement	<ul style="list-style-type: none"> • PC, Netzwerk und Drucker-Konnektivität mittels RS232C Schnittstellen • speichert bis zu 1.000 Ergebnisse • integrierter Barcodescanner (optional)

Catalog No.	Name
5213-0051-6200	• Biosen C-Line GP+ (1Messkanal)
5213-0121-6200	• Biosen C-Line GP+ (2 Messkanal)
5214-0051-2200	• Biosen C-Line Clinic (1Messkanal)
5214-0121-2200	• Biosen C-Line Clinic (2 Messkanal)



1 Eine 20 µl Blutprobe in das Kapillarröhrchen aufnehmen.



2 Kapillarröhrchen in das Reaktionsgefäß legen und durchmischen.



3 Ergebnisse werden innerhalb von 20 – 45 Sekunden angezeigt.



Süss Medizintechnik

Süss Medizintechnik GmbH
 Fuchsleiten 3
 AT - 4911 Tumeltsham
 Tel. 07752 81702
 info@suessmed.com
 www.suessmed.com

Vertrieb durch

Hersteller
 EKF-diagnostic GmbH
 Ebendorfer Chaussee 3
 39179 Barleben
 Germany

www.ekfdiagnostics.de

EKF | **Diagnostics for life**